

Wunde

Immer gut versorgt



Wunde

Mit dem
Prontosan®-Askina®-System
immer gut versorgt

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Wundheilungsstörungen stellen ein erhebliches medizinisches und wirtschaftliches Problem dar. Wenn normale Wundheilungsmechanismen durch verschiedenste Grunderkrankungen behindert werden, kann sich bereits nach einem Bagateltrauma eine schlecht heilende Wunde entwickeln.

Wundspülung und Antiseptik

Prontosan® Wundspüllösung	6
Prontosan® Wound Gel Wound Gel X	8
Prontosan® Wound Spray	10
Lavasept® steriles Konzentrat	11

Askina®-Fokusprodukte

Askina® Calgitrol® Silberalginat aus der Tube	14
Askina® Sorb	16
Askina® SilNet	18
Askina® Absorb+	20
Askina® Foam Foam Cavity Trachea Heel	22
Askina® DresSil Border Sacrum Mini Heel	24
Askina® Transorbent® Border Sacrum	26

Askina®-Ergänzungsprogramm

Askina® Carbosorb	27
Askina® Calgitrol® Ag	28
Askina® Gel	29
Askina® Derm	30
Askina® Pad Pad S	31
Askina® Touch	32
Askina® THINSite®	33
Askina® Barrier Film Cream Swabs	34
Klassische Verbandstoffe	35
Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden	36
Hygiene – MRE	38
Services und Dienstleistungen	39
Unsere Anwendungsbereiche	40
Literatur	42
Bestellformular	43

Es gilt der Grundsatz: Diagnostik vor Therapie.

Feuchte Wundbehandlung

- › Schmerzarm¹
- › Fördert die Wundheilung¹

Wundspülung/Wundreinigung

Nur eine saubere Wunde kann heilen.

- › Effektive und schonende Wundreinigung
- › Für chronische und akute Wunden
- › Für alle Wundsituationen

Hydroaktive Wundauflagen

- › Erzeugen ein physiologisches Wundmilieu
- › Keimbarriere
- › Verordnungsfähig



Nur eine saubere Wunde kann heilen.
Wundspülung | Antiseptik

	Chronische Wunden	Akute Wunden	Verbrennungen Grad III	Verbrennungen bis Grad II b	Thermische Wunden	Chirurgische Wunden	
Prontosan® Wundspüllösung	●	●		●	●	●	 › Für wiederholten und langfristigen Gebrauch › Schaffung eines heilungsfördernden Milieus › Dermatologische Unbedenklichkeit › Kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen › Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
Prontosan® Wound Gel	●	●		●	●	●	 › Fließfähige Gelkonsistenz › Als Hydrogel erstattungsfähig › Steril › Schmerzarme Anwendung › Für wiederholten und langfristigen Gebrauch › Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
Prontosan® Wound Gel X	●	●	●	●	●	●	 › Höhere Gelviskosität für flächige Applikation › Als Hydrogel erstattungsfähig › Steril › Schmerzarme Anwendung › Für wiederholten und langfristigen Gebrauch › Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch
Prontosan® Wound Spray	●	●		●	●	●	 › Beugt Wundinfektionen und Biofilm vor › Schützt vor multiresistenten Erregern › Fördert die Wundheilung › Schmerzarm anwendbar, hautverträglich › Gute Verträglichkeit mit Katheter und Sondenmaterialien²

Voraussetzung jeder Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche, des Wundrandes sowie der Wundumgebung. Wundbeläge und Biofilm stören die Mikrozirkulation. Eine gestörte Mikrozirkulation verhindert die Bildung von Granulationsgewebe. Dies begünstigt wiederum die Entstehung des Biofilms. Hält die Störung an, wird die Wunde chronisch.

Eine andauernde funktionelle Störung der Mikrozirkulation führt an der Wundoberfläche und am Wundrand zum Untergang von intaktem Gewebe. Dieser Circulus vitiosus lässt sich durch eine effektive und gleichzeitig schonende Wundreinigung bei jedem Verbandwechsel durchbrechen.

Prontosan®

Sterile, gebrauchsfertige Wundspüllösung



Für wiederholten und langfristigen Gebrauch

Entfernt Biofilm³ (inkl. MRSA)

Verhindert die Neubildung von Biofilm⁴

Schaffung eines heilungsfördernden Milieus

Dermatologische Unbedenklichkeit


Kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen

Haltbarkeit bis 8 Wochen nach Anbruch

Über die Effektivität einer Wundspüllösung entscheidet die Kombination der Inhaltsstoffe. Prontosan® enthält Polihexanid zur Konservierung gegen Keimwachstum und Undecylenamidopropyl-Betain als oberflächenaktive Substanz. Die besonders wirksame Kombination dieser beiden Inhaltsstoffe löst den Biofilm und ermöglicht eine ausgezeichnete Wundreinigung, die zu einer signifikanten Verkürzung der Wundheilung führt.¹




Herkömmliche Wundspülung

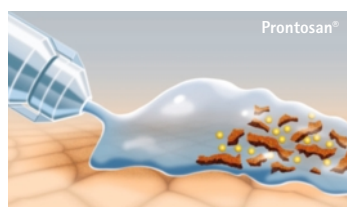

Prontosan®

Vergleich der Wirksamkeit von Spüllösungen auf Biofilm (*Pseudomonas aeruginosa*); Einwirkzeit 24 Stunden⁵

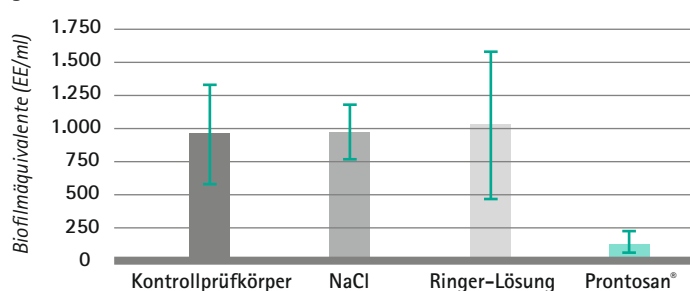

TIPPS ZUR EINWIRKZEIT

Da Prontosan® eine Wundspüllösung ist und kein mikrobizid wirkendes Desinfektionsmittel gibt es keine Einwirkzeit im eigentlichen Sinn. Zur Reinigung soll die Wunde intensiv gespült werden, bei starkem Wundbelag ggf. bis zur Verbesserung der Reinigungsleistung einwirken lassen.



Einsatzgebiete

Spülung, Reinigung und Feuchthalten von

- › Chronischen Wunden
- › Wundverbänden
- › Akuten Wunden (Schnittverletzungen, Biss-, Platz und Schürfwunden)
- › Thermischen Wunden, Verbrühungen und Verbrennungen
- › Spenderarealen bei Hauttransplantationen
- › Palliative Wunden

Gewebeschonende Ablösung von

- › Fibrinbelägen
- › Resten von Wundaufträgen

Zur Instillation für die V.A.C. Ultra von KCI empfohlen*



Vor der Anwendung

- › Zum Öffnen der Flasche Abstandsring entfernen und Verschlusskappe wieder fest aufschrauben.

Anwendungsmöglichkeiten

- › Direkte Applikation aus der praktischen Spritzflasche
- › Abreiben der Wunde mittels getränktem Tupfer oder Kompresse
- › Anwärmen der Spüllösung auf Körpertemperatur mehrfach möglich
- › Zum Spülen von tiefen Wunden ist ein steriler Einmal-Frauenkatheter geeignet
- › Spülung und Reinigung einer oberflächlichen akuten Wunde (1–2 min)
- › Lösen von festsitzenden Wundbelägen sowie Biofilm: Abdeckung des Wundareals mit einer sattnass getränkten Kompresse für 10 bis 15 min

Hinweis

Zu Beginn der Behandlung und bei jedem Verbandwechsel sollte die Wunde gespült und mechanisch gereinigt werden. Entfernung von überschüssigem Exsudat, Zelltrümmern, Nekrosepateikeln und Biofilm.

- › Nur gereinigte Wunden können gut beurteilt werden und besser heilen.
- › Dies muss auch immer unter dem Aspekt MRSA/MRE gesehen werden!

Prontosan®	Abmessung	VE	PZN	REF
Patronenflasche im Riegel	40 ml	24 Stück	09513652	400484
Spritzflasche	350 ml	1 Stück	02850062	400403
Spritzflasche mit Aufhänger im Boden für V.A.C. Ultra (KCI)	1.000 ml	1 Stück	09003678	400446

Inhaltsstoffe: 0,1 % Undecylenamidopropyl-Betain,
0,1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid)

Prontosan® Wound Gel | Prontosan® Wound Gel X

Hydrogel zur Befeuchtung und Reinigung von Verbrennungen, akuten und chronischen Wunden



In 2 Gel-Viskositäten erhältlich

Gute Haftung auf großen Wundflächen

Entfernung von Wundbelägen – inklusive Biofilm³

Verhinderung der Bildung von Biofilm (Remanenz)⁴

Reduzierung der Keimverschleppung

Reduzierung des Wundgeruchs

Schmerzarme Anwendung

Für den wiederholten und langfristigen Gebrauch

Haltbarkeit nach Anbruch 8 Wochen

Steril

Während sich manche Wunden gut mit der Prontosan® Wundspüllösung reinigen lassen, müssen Wunden mit festsitzenden Fibrinbelägen, Zelldetritus und Biofilm zuvor mit Prontosan® Wundspüllösung gereinigt werden. Abhängig von der Größe und Tiefe der Wunde stehen mit Prontosan® Wound Gel und Prontosan® Wound Gel X zwei Gelvarianten unterschiedlicher Konsistenz zur Verfügung.


Welches Gel für welche Wundsituation

Prontosan® Wound Gel	Prontosan® Wound Gel X
30 ml Patronenflasche	50 g und 250 g Tube
Flüssig	Hohe Viskosität
Für kleine, tiefe und schwer erreichbare Wunden Für Brandwunden der Grade I und II	Für großflächige Wunden Für alle Brandwunden bis Grad III
Wenn kleine Mengen benötigt werden	Für Wunden, die eine höhere Viskosität des Gels erfordern

BVMed – Verordnungs- und Erstattungsfähigkeit von Verbandmitteln

Verbandmittel sind verordnungsfähig. Sie fallen nicht unter die Ausschlussregelung nach § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und auch nicht unter die Neuregelung des AVWG.

... d.h. alle Verbandstoffe und Hydrogele von B. Braun sind derzeit als Einzelverordnung zu Lasten der GKV verordnungs- und erstattungsfähig.

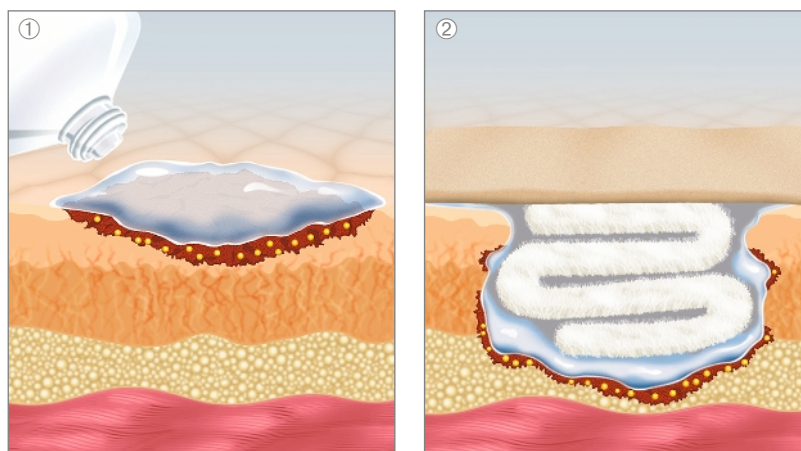

Einsatzgebiete

Reinigung, Dekontamination und Befeuchtung von

- › Akuten Wunden
- › Chronischen Wunden (Dekubitus, Ulcus Cruris, Diabetisches Fußsyndrom)
- › Postoperativen Problemwunden
- › Thermischen Wunden, Verbrennungen bis Grad III (siehe Tabelle links)
- › Spenderarealen bei Hauttransplantationen
- › Palliativen Wunden

Konservierende Befeuchtung von Wundauflagen

Anwendung

Die Wahl zwischen Prontosan® Wound Gel und Prontosan® Wound Gel X ermöglicht die optimal angepasste Versorgung von kleineren und tieferen Wundkavitäten sowie von großflächigen Wunden.

- ① Bei flachen, großflächigen Wunden Prontosan® Wound Gel X in einer 3–4 mm dicken Schicht auftragen und mit einem Sekundärverband abdecken.
- ② Für die Anwendung in tiefen Wundhöhlen oder -taschen wird Prontosan® Wound Gel auf den Wundgrund eingebracht. Anschließend wird die Wunde druckfrei tamponiert und mit einem Sekundärverband verschlossen.

Hinweis

- › Die Wunden sollten zuerst mit Prontosan® Wundspüllösung gespült und gereinigt werden.
- › Prontosan® Wound Gel verbleibt bis zum nächsten Verbandwechsel auf der Wunde und hat somit eine dauerhafte Wirkung.



Prontosan® Wound Gel	Abmessung	VE	PZN	REF
Prontosan® Wound Gel	30 ml Patronenfl.	1 Stück	02855349	400505
Prontosan® Wound Gel X	50 g Tube	1 Stück	09706693	400517
Prontosan® Wound Gel X	250 g Tube	1 Stück	06464893	400508
Inhaltsstoffe: 0,1% Poliaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, Aqua ad injectabilia				

Prontosan® Wound Spray

Reinigung und Befeuchtung von oberflächlichen Wunden und Verbrennungen



Voraussetzung für eine gute Wundheilung ist die Sauberkeit der Wundoberfläche und des Wundrandes. Dies wird unterstützt durch eine effektive und gleichzeitig schonende Behandlung mit Prontosan® Wound Spray.

Anwendung

Prontosan® Wound Spray großzügig über die Wundfläche und den Wundrand sprühen, herunterlaufende Lösung mit einer sterilen Kompresse abtupfen. Anschließend mit einem Wundverband abdecken.

Verklebte und anhaftende Wundauflagen können mit Prontosan® Wound Spray befeuchtet und dadurch einfach und schmerzarm entfernt werden. Vor der Anwendung von Prontosan® Wound Spray Reste von Salben, Cremes und anderen Wundtherapeutika entfernen.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

[illegible]

POLIHEXANID IST MITTEL
DER 1. WAHL

Einsatzgebiete

- Akute und chronische oberflächliche Wunden
- Riss-, Schnitt-, Schürf- und Bisswunden
- Leichte Verbrennungen/Verbrühungen
- Reinigung der Eintrittspforten von PEG-/PEJ-Sonden sowie transurethralen und suprapubischen Kathetern
- Reinigung peristomaler Hautareale
- Atraumatisches Lösen von verkrusteten Wundverbänden

Eigenschaften

- › Beugt Wundinfektionen und Biofilm vor
- › Schützt vor multiresistenten Erregern (MRSA, VRE, ESBL)
- › Fördert die Wundheilung
- › Schmerzarm anwendbar, hautverträglich
- › Gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien



Lavasept® steriles Konzentrat

20% Polihexanid-Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut



Lavasept® steriles Konzentrat

Wirkstoff: Polihexanid **Zusammensetzung:** 1 ml Konzentrat enthält 200 mg Polihexanid. **Sonstige Bestandteile:** Wasser für Injektionszwecke, Macrogol 4000, Salzsäure **Anwendungsgebiete:** Keimabtötende Behandlung zur Unterstützung der chirurgischen Versorgung (adjuvante antiseptische Behandlung) infizierter Wunden, von Knochen- und Weichteilinfektionen und zur Vorbeugung von Wundinfektionen (z. B. antiseptische Prophylaxe während operativer Eingriffe). **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Polihexanid oder einen der sonstigen Bestandteile, Anwendung im Bereich von Knorpeln und Gelenken, intraperitoneale Anwendung, Anwendung im Bereich des zentralen Nervensystems (Rückenmark und Gehirn) und der Hirnhaut (Meningen), im Mittel- und Innenohr sowie im Innenauge. **Nebenwirkungen:** Allergische Reaktionen wie Nesselsucht mit Juckreiz und Quaddelbildung (Urtikaria) und Hautausschlag (Exanthem). Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10.000) allergische Schockreaktionen. **Stand der Information:** 04/2014 **Pharmazeutischer Unternehmer:** B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

Keimabtötende Behandlung zur Unterstützung der chirurgischen Versorgung infizierter Wunden, von Knochen und Weichteilinfektionen

- › Vorbeugung von Wundinfektionen (z. B. antiseptische Prophylaxe während operativer Eingriffe)
- › Keine Resorption (Nachweisgrenze 10 ppm)
- › Sehr gute Gewebeverträglichkeit des Wirkstoffs Polihexanid
- › Hohe Ergiebigkeit durch Verdünnung 1:500 bis 1:1000
- › Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien und Pilze
- › Nicht reizend (verdünnte Lösungen)
- › Farblos
- › Apothekenpflichtig

Lavasept® steriles Konzentrat	Abmessung	VE	PZN	REF
Ampulle	2 ml	1 Stück	05950108	4927321
Ampulle	2 ml	5 Stück	05950120	4925322
Flasche	100 ml	1 Stück	05950137	4927031

Inhaltsstoffe: **Wirkstoffe:** 1 ml Konzentrat enthält 200 mg Polihexanid, **Sonstige Bestandteile:** Wasser für Injektionszwecke, Macrogol 4000, Salzsäure





Individuell, phasengerecht, einfach, sicher.

Askina® Produkte zur Versorgung chronischer Wunden

	Dekubitus	Ulcus cruris	Diabetisches Fußulcus	Abschürfungen	Traumatische Wunden	Spalthautentnahmestellen	Chirurgische Wunden	Verbrennungen Grad I	Verbrennungen Grad II	Thermische Wunden	
Askina® Calgitrol® Das Silberaldginat aus der Tube	●	●	●	●	●	●	●		●	●	 - Leichte und passgenaue Applikation - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Wundkonturen - Kontrollierte, gleichmäßige Abgabe von Silberionen - Wirksam gegen breites Keimspektrum (inkl. MRSA) - Einfach durch Spülen zu entfernen
Askina® Sorb Die formstabile Alginat-Wundauflage	●	●	●	●	●	●	●		●	●	 - Reinigt die Wunde - Ist formstabil und in einem Stück zu entfernen - Bietet ein idealfeuchtes Wundmilieu - Absorbiert überschüssiges Exsudat - Lange Tragedauer
Askina® SilNet Die weiche Silikon-Wundauflage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	 - Atraumatische Verbandwechsel - Einfaches Handling - Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben - Hypoallergen
Askina® Absorb+ Die nichthaftende superabsorbierende Wundauflage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	 - Hohe, langanhaltende Aufnahmekapazität - Bleibt weich und flexibel - Flache Form auch wenn gesättigt - Hypoallergen, enthält keine Klebstoffe
Askina® Foam Die saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation	●	●	●		●						 - Hohe und schnelle Exsudataufnahme - Gutes Rückhaltevermögen - Unter Kompression anwendbar
Askina® DresSil Border Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	 - Atraumatischer Verbandwechsel - Hoher Tragekomfort für den Patienten - Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben - Unter Kompression verwendbar - Hypoallergen
Askina® Transorbent Die Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht bei mäßiger Exsudation	●	●	●	●	●	●					 - Mehrschichtiger Aufbau - Hydrogelschicht für ein idealfeuchtes Wundmilieu - PU-Schaumstoffschicht absorbiert überschüssiges Wundexsudat - Atraumatischer Verbandwechsel - Auch mit Fixierrand verfügbar
 wenig nässende Wunde – wenig Exsudation	 mittel nässende Wunde – mittlere Exsudation					 stark nässende Wunde – starke Exsudation			 sehr starke Exsudation		

Askina® Calgitrol®

Das Silberalginat aus der Tube



Einfache, zielgerichtete Applikation

Kontrollierte Silber-Ionen-Abgabe für eine anhaltende antimikrobielle Wirkung

Wirksam gegen ein breites mikrobielles Spektrum, inklusive MRE

Muss nicht befeuchtet (aktiviert) werden


Sehr gute Anpassungsfähigkeit an den Wundgrund

Hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht

Durch Spülen (Prontosan®) einfach aus der Wunde zu entfernen

Durch GKV erstattungsfähig

Askina® Calgitrol® ist eine weiche und homogene Silberalginat-Matrix, die sich eng an das Wundbett anpasst und dadurch „tote Räume“ minimiert, in denen sich Bakterien vermehren können. Es ist steril in einer Tube mit einer langen Tülle verpackt. Diese erleichtert die Applikation der Silberalginat-Matrix in Tunneln, Fistelgängen und bei schwierigeren Wundformen.

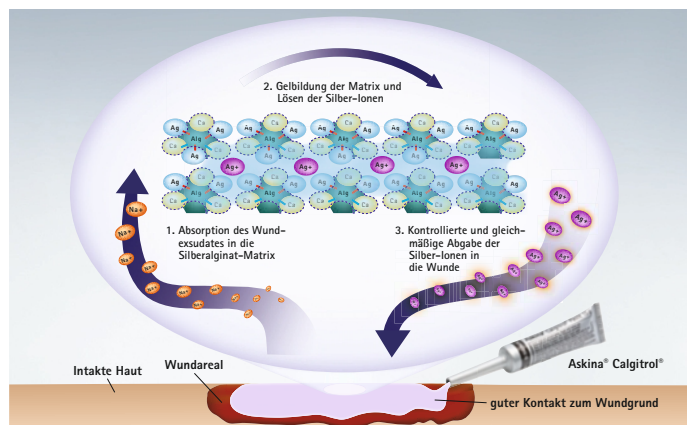

TIPP


- › Tube vor dem Öffnen leicht durchkneten oder schütteln
- › Entfernung von Askina® Calgitrol® durch gründliche Wundspülung mit Prontosan®



- ①+② Komplettte Füllung der Kavität mit Askina® Calgitrol®
- ③ Abdeckung mit einem Sekundärverband (z.B Askina® Foam) und Fixierung

1. Kontinuierliche Silber-Ionen-Abgabe⁶


Silber-Ionen (ppm)

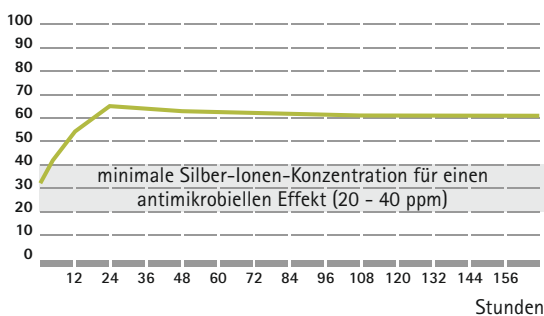

Schnell einsetzende, dauerhafte antimikrobielle Wirkung über mehr als 5 Tage

2. Antimikrobielle Wirksamkeit^{7,8}

Log (CFU) Reduktion

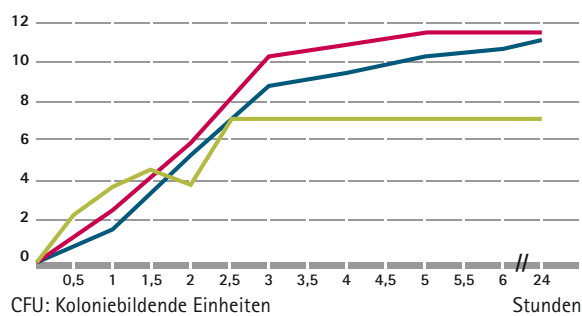


- *Escherichia coli* NCIMB 12416; **8,6 Log Reduktion in 3 Stunden**
- *Pseudomonas aeruginosa* NCIMB 8626; **10,2 Log Reduktion in 3 Stunden**
- Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA, ATCC BAA-44); **6,4 Log Reduktion in 3 Stunden**

Einsatzgebiete

- › Diabetische Fußulcera
- › Dekubitus Kategorie II - IV
- › Ulcus cruris venosum/arteriosum
- › Verbrennungen bis zweiten Grades
- › Hautspendeareale
- › Traumatische Wunden

3. Kein nennenswerter Anstieg der Silber-Ionen im Blutserum^{9,10}

Silber-Ionen-Konzentration (ppm)

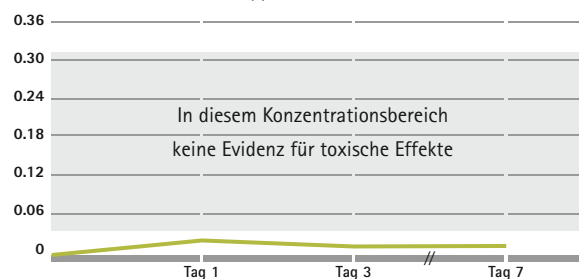

Askina® Calgitrol®	Abmessung	VE	PZN	REF
Tube	15 g	5 Stück	09711530	6241505
Tube	15 g	10 Stück	09711547	6241510

Askina® Sorb

Die formstabile Alginat-Wundauflage



Flexibel und einfach zu applizieren

Passt sich optimal den Konturen der Wunde an

Hohe Absorptionskapazität

In einem Stück zu entfernen

Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur


Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen Verbandwechsel

Askina® Sorb ist eine hoch flexible, primäre Wundauflage, bestehend aus 85% Calciumalginat und 15% Carboxymethylcellulose (CMC). Die verwebte Alginat-/CMC-Faserstruktur gewährleistet eine hohe Absorptionsfähigkeit, ein gutes Retentionsvermögen und vermindert das Risiko der Mazeration der Wundränder. Askina® Sorb erlaubt ein atraumatisches, schmerzarmes Entfernen in einem Stück.

Hohe Absorptionskapazität

Im Rahmen einer Vergleichsuntersuchung¹¹ wurde die Absorptionsfähigkeit von Askina® Sorb mit der eines handelsüblichen auf Carboxymethylcellulose basierenden Wundverbands verglichen.

Das Ergebnis der Untersuchung demonstriert mit 28,08 g/100 cm² eine überlegene Absorptionsfähigkeit für Askina® Sorb, gegenüber einem Wert von 19,22 g/100 cm² für das Vergleichsprodukt.

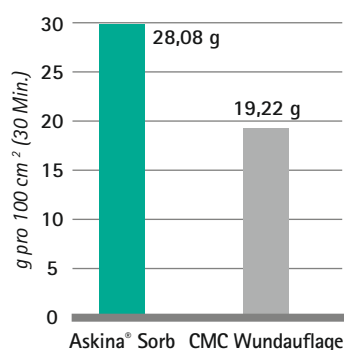


TIPP

Bei eher trockenen Wundverhältnissen Kombinationsmöglichkeiten anfeuchten mit Prontosan® Wundspüllösung oder Kombination mit Prontosan® Wound Gel oder Askina® Gel (Hydrogele).

TIPPS ZUR WAHL DER GEEIGNETEN WUNDAUFLAGE


- › Abdeckung mit Askina® Pad oder bei stärkerer Exsudation mit Askina® Absorb+ oder Askina® Foam
- › Flächige Fixierung mit Fixiervlies bzw. randseitige Fixierung mit Pflasterstreifen
- › Zirkuläre Fixierung mit Fixierbinde

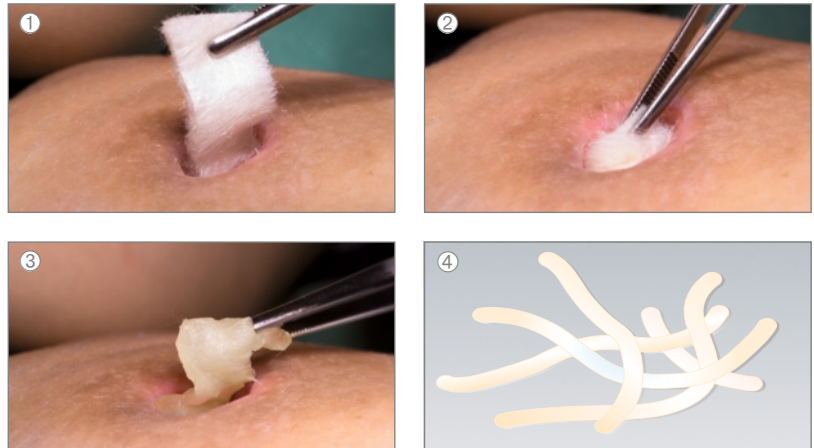

Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Spalthautentnahmestellen
- › Traumatische Wunden
- › Abschürfungen
- › Thermische Wunden, Verbrennungen Grad II
- › Chirurgische Wunden u.a. in der Proktologie, Gefäßchirurgie, Visceralchirurgie, Urologie

- ① Die Askina® Sorb Komresse oder Tamponade kann einfach in die Wunde appliziert werden. Durch die weiche Materialstruktur passt sich Askina® Sorb optimal den Wundgegebenheiten an, ohne dass ein Zuschneiden erforderlich wäre.
- ② Mit Askina® Sorb die Wunde locker auffüllen.
- ③ Durch die hervorragende Absorptionsfähigkeit und Stabilität lässt sich Askina® Sorb besonders gut in einem Stück entfernen.
- ④ Verwebte Alginat-/CMC-Faserstruktur

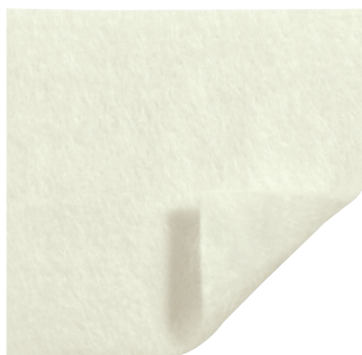

Askina® Sorb	Abmessung	VE	PZN	REF
Wundauflage	6 cm x 6 cm	3 Stück	02251605	2109S
	6 cm x 6 cm	10 Stück	02251611	2115S
	10 cm x 10 cm	3 Stück	02251640	2107S
	10 cm x 10 cm	10 Stück	02251657	2116S
	15 cm x 15 cm	3 Stück	02252088	2108S
	15 cm x 15 cm	10 Stück	02252102	2102S
Tamponade	2,7 cm x 34 cm	3 Stück	02258323	2106S

Askina® SilNet

Die weiche Silikon-Wundauflage



Atraumatische Verbandwechsel

Einfaches Handling

Ermöglicht ein sehr gutes Exsudatmanagement

Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben

Hypoallergen

Askina® SilNet ist eine transparente, hypoallergene Wundauflage, die dank der Silikonbeschichtung nicht mit der Wunde verklebt und den Durchtritt des Wundexsudates in den Sekundärverband erlaubt.


Die längere Verweildauer von Askina® SilNet auf der Wunde gewährt trotz eines regelmäßigen Wechsels des Sekundärverbandes, dass der Wundheilungsprozess nicht gestört wird und ein optimales Wundklima erhalten bleibt.

Besonders bei Hauttransplantationen kann Askina® SilNet das transplantierte Gewebe über einen längeren Zeitraum sicher und schonend fixieren. Dank des sehr guten Exsudatmanagements und der Vermeidung der Wundtraumata beim Verbandwechsel können sowohl das transplantierte Gewebe als auch das Spenderareal optimal anwachsen.¹

TIPP

Askina® SilNet ist mit einer Vielzahl von Sekundärverbänden kombinierbar:

- › Askina® Foam
- › Askina® Heel
- › Askina® Calgitrol® Ag
- › Askina® Pad
- › Askina® Touch

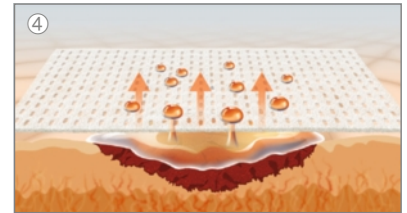

Einsatzgebiete chronische Wunden



Askina® SilNet kann verwendet werden bei

- › Traumatische Wunden, z.B. Schnitt- und Schürfwunden
- › Thermische Wunden, z.B. Verbrennungen ersten und zweiten Grades
- › Post-operative Wunden
- › Vorgeschädigter Haut (z.B. Cortisonhaut)
- › Hypospadie
- › Versorgung von Hauttransplantaten und Entnahmestellen

und im Bereich der

- › Plastischen Chirurgie
- › Palliativpflege

- ① Entfernen der transparenten Schutzfolie vor dem Auflegen auf die Wunde.
- ② Auflegen von Askina® SilNet auf die Wunde und abziehen der blauen Trägerfolien.
- ③ Applikation eines geeigneten Sekundärverbandes aus dem Askina® Sortiment.
- ④ Vertikaler Durchtritt des Wundexsudats durch die poröse Struktur von Askina® SilNet in den absorbierenden Verband.

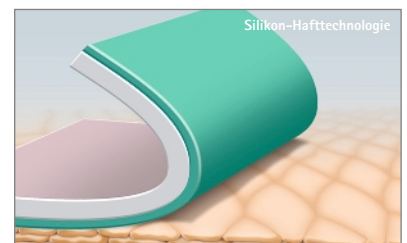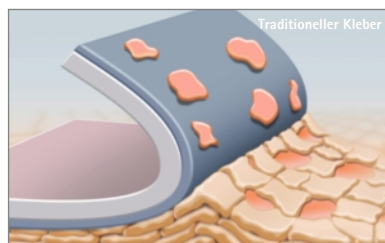

Askina® SilNet	Abmessung	VE	PZN	REF
	5 cm x 7,5 cm	10 Stück	05496017	5195710
	5 cm x 7,5 cm	3 Stück	05496023	5195703
	10 cm x 7,5 cm	10 Stück	05495957	5197510
	10 cm x 7,5 cm	3 Stück	05495963	5197503
	10 cm x 18 cm	10 Stück	05495986	5191810
	10 cm x 18 cm	3 Stück	05495992	5191803
	20 cm x 30 cm	5 Stück	05496000	5192305

Askina® Absorb+

Die nichthaftende superabsorbierende Wundauflage



Hohe, langanhaltende Aufnahmekapazität

Hohe Retention (kein Schwamm-Effekt):

- › Kann mit Kompressionstherapie verwendet werden
- › Minimiert das Mazerationsrisiko

Bleibt weich, flexibel und flach, auch wenn gesättigt

Atraumatisch

Hypoallergen, enthält keine Klebstoffe

Askina® Absorb+ ist eine hoch absorbierende Wundauflage, die große Mengen an Wundexsudat und Bakterien aufnehmen und speichern kann. Trotzdem wird mit Askina® Absorb+ ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten.

Das 3-Faser-System gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Wundexsudates in der Wundauflage, so dass diese keine kissenartige Aufwölbung ausbildet.



TIPP

- › Askina® Absorb+ kann als primärer Wundverband eingesetzt werden, oder als sekundärer Verband, bei sehr starker Exsudation
- › Falls erforderlich, kann bei sehr starker Exsudation Askina® Absorb+ übereinander und bei sehr großen Wunden überlappend gelegt werden
- › Nicht in tiefe Wunden applizieren, da sich die Wundauflage ausdehnt

Wundreinigung mit Prontosan® vor Abdeckung mit Askina® Absorb+



- › Reinigen mit Prontosan® und Abdecken mit Askina® Absorb+
- › Entfernt schädliche Zelltrümmer, Fibrinbeläge und Bakterien
- › Reduziert die Geruchsbelastung


Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden
- › Palliative Wunden

Wirkungsschema

Das innere Pad besteht aus 3 Komponenten:

1. Zellulosefaser zur gleichmäßigen Verteilung des Wundexsudates
2. Superabsorbierende Faser für hohe Aufnahmekapazität und Speicherung
3. Bikomponentenfaser für die Bindung und Festigkeit der o.g. Fasern

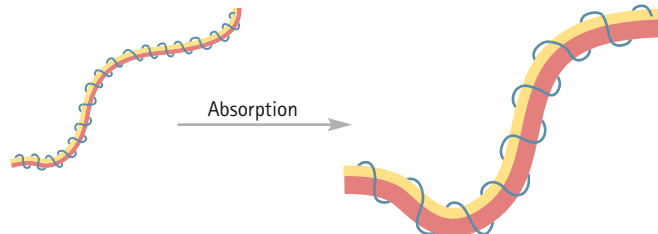

Askina® Absorb+	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	09390451	3331010
	10 cm x 20 cm	10 Stück	09390468	3331210
	20 cm x 20 cm	5 Stück	09390474	3332005

Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Trachea | Askina®

Die saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation

Jetzt mit neuer PU-Schaumstruktur
verbessertes Exsudatmanagement!

Schnelle Absorption auch von dickflüssigerem
Wundexsudat

Sehr gutes Exsudat-Management


Sehr hoher Tragekomfort

Unter Kompression formstabil

Kosteneffizienz durch seltenere Verbandwechsel

Zweilagige, nichthaftende Schaumstoffwundauflage, bestehend aus:

- › Einer hydrophilen, atmungsaktiven, hochabsorbierenden Schicht aus Polyurethanschaum, die eine schnelle effektive Exsudataufnahme (auch dickflüssiges Wundexsudat) gewährleistet und sich dem Wundbett anpasst.
- › Einem transparenten, dampfdurchlässigen Polyurethanfilm, der für Wasser und Bakterien undurchlässig ist und ein effizientes Exsudatmanagement gewährleistet.

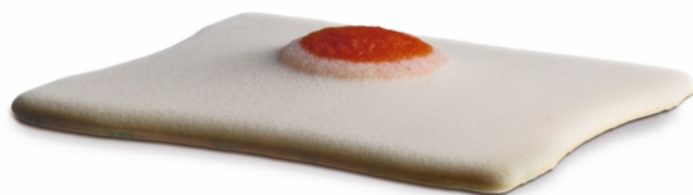

Bei Wunden von 1 bis 2 cm Tiefe kann auf Wundfüller verzichtet werden, da sich die Foam-Struktur unter Exsudataufnahme in das Wundbett hinein aufwölbt und damit einen guten Kontakt zum Wundgrund herstellt.

Heel

TIPP

Askina® Foam kann unter Kompression angewendet werden. Die Absorptionsfähigkeit des Schaummaterials wird dadurch nicht beeinflusst.



Einsatzgebiete Askina® Foam

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden

Einsatzgebiete Askina® Foam Cavity

- › Tiefe und zerklüftete Wunden
- › Wundtunnel
- › Wunden mit hohem Exsudataufkommen

Einsatzgebiete Askina® Trachea

- › Versorgung von Trachealkanülen und anderen Drainagen

Einsatzgebiete Askina® Heel

- › Anatomischer Fersenverband
- › Schutz von Innen- und Außenknöchel
- › Druckentlastung

Anwendung Askina® Foam Cavity

Askina® Foam Cavity direkt in die Wundtasche locker einlegen. Askina® Foam Cavity mit einem geeigneten Sekundärverband abdecken.

- › Askina® Foam Cavity nimmt Exsudat auf ohne aufzuquellen.



Askina® Foam	Abmessung	VE	PZN	REF
Askina® Foam	5 cm x 7 cm	3 Stück	02163775	7240703
	5 cm x 7 cm	10 Stück	02192707	7240710
	10 cm x 10 cm	3 Stück	02192713	7241003
	10 cm x 10 cm	10 Stück	02231548	7241010
	10 cm x 20 cm	10 Stück	02239024	7241210
	20 cm x 20 cm	5 Stück	02243646	7242005
Askina® Foam Cavity	2,5 cm x 40 cm	3 Stück	02593375	7244003
	2,5 cm x 40 cm	10 Stück	02593381	7244010
Askina® Trachea *	9,5 cm x 8,5 cm	10 Stück	02499972	7248510
Askina® Heel	225 cm²	5 Stück	00009308	7240105

* Hilfsmittelverzeichnis/Abrechnungspositionsnummer: 12 99 99 1001

Askina® DresSil | Askina® DresSil Border | Askina® DresSil Sacrum

Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband

Jetzt mit neuer PU-Schaumstruktur
verbessertes Exsudatmanagement!

Sehr gutes Exsudatmanagement

Einfaches Handling

Hoher Tragekomfort für den Patienten

Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben

Unter Kompression verwendbar

Hypoallergen


Silikon-Hafttechnologie

Die Wundauflagen sind mit einer weichen Silikon-Haftfläche beschichtet und haften daher sanft und sicher. Das verwendete Silikon passt sich optimal der unebenen Hautoberfläche an und bildet so im Vergleich zu traditionellen Haftbasen eine größere Kontaktfläche zur Haut.

Askina® DresSil ist atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut. Die Silikon-Haftfläche minimiert das Trauma und den Schmerz beim Verbandwechsel.

Der atmungsaktive, hochabsorbierende Polyurethanschaum gewährleistet ein sehr gutes Exsudatmanagement, über den transparenten, für Wasser und Bakterien undurchlässigen Polyurethanfilm kann das Exsudat verdunsten.

Der Aufbau von Askina® DresSil

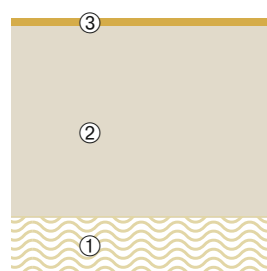

1. Schicht – Silikonhaftbasis

Haftet gut auf der Wundumgebung. Haftet nicht auf der Wundfläche. Lässt sich sanft und schmerzarm entfernen.

2. Schicht – Polyurethanschaum


Vertikale Aufnahme von Wundexsudat verhindert Mazeration am Wundrand. Verhinderung des Einwachsens von Granulationsgewebe.

3. Schicht – Semipermeable Polyurethanfolie
Diffusionsoffen und wasserundurchlässig

Askina® DresSil Heel



Jetzt auch in
„Mini-Abmessung“
(6 x 6 cm; Durchmesser
Wundpad 3 cm)
verfügbar für die Ver-
sorgung im Vorfuß-
und Zehenbereich

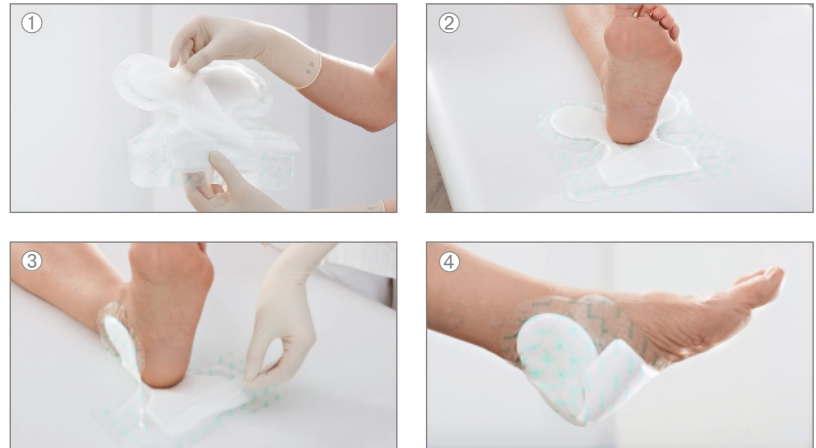

Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Traumatische Wunden
- › Chirurgische Wunden
- › Palliative Wunden



Askina® DresSil



Askina® DresSil Border



Askina® DresSil Sacrum



Askina® DresSil Heel



- ① Lösen der oberen Schutzfolie
- ② Ferse mittig auf Wundauflage platzieren
- ③ Anmodellieren der Flügel über den Knöcheln beidseits
- ④ Verband über Ferse und Fußsohle modellieren

Askina® DresSil	Größe mit FR*	Größe ohne FR	VE	PZN	REF
		5 x 7 cm	3 Stück	06489137	5295703
		5 x 7 cm	10 Stück	06489166	5295710
		10 x 10 cm	3 Stück	06489172	5291003
		10 x 10 cm	10 Stück	06489189	5291010
		15 x 15 cm	3 Stück	06489203	5291503
		15 x 15 cm	10 Stück	06489226	5291510
		10 x 20 cm	3 Stück	06489338	5291203
		10 x 20 cm	10 Stück	06489404	5291210
		20 x 20 cm	5 Stück	06489410	5292005
Border					
	6 x 6 cm	3 x 3 cm	10 Stück	10397317	5396610
	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	3 Stück	07626211	5397503
	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10 Stück	07626300	5397510
	10 x 10 cm	7 x 7 cm	3 Stück	07626323	5391003
	10 x 10 cm	7 x 7 cm	10 Stück	07626352	5391010
	15 x 15 cm	12 x 12 cm	3 Stück	07626375	5391503
	15 x 15 cm	12 x 12 cm	10 Stück	07626381	5391510
	15 x 20 cm	12 x 17 cm	3 Stück	07626435	5395203
	15 x 20 cm	12 x 17 cm	10 Stück	07626441	5395210
	20 x 20 cm	17 x 17 cm	5 Stück	07626458	5392005
Sacrum					
	16 x 17,5 cm	13 x 14,5 cm	5 Stück	07765243	5491605
Heel					
	22 x 21,6 cm		5 Stück	10397323	5592205
* FR = Fixierrand (umlaufend ca. 15 mm)					

Askina® Transorbent® | Border | Sacrum


Die Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht und Fixierrand bei mäßiger Exsudation



Askina® Transorbent® Border und Askina® Transorbent® Sacrum sind vom Aufbau identisch zu Askina® Transorbent®. Beide Wundauflagen sind jedoch zusätzlich mit einem umlaufenden 2 cm Fixierrand versehen.

Eine semipermeable Polyurethanfolie verhindert das Aufrollen und Ablösen der Wundauflage. Es wird eine optimale Anpassung und Haftung an schwierigen Körperstellen erzielt.

Der Aufbau von Askina® Transorbent®

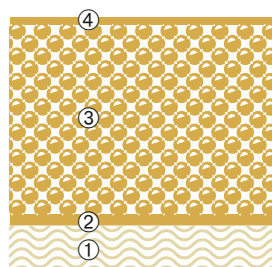

- 1. Schicht – Adhäsivschicht**
Klebt nicht auf der Wunde
- 2. Schicht – Hydrogelschicht**
Absorbiert Wundexsudat, gibt es in den Verband weiter; erhält ein feuchtes Wundmilieu
- 3. Schicht – Schaumstoffschicht**
Fördert den Gasaustausch, leitet Wundexsudat zur Verdunstung weiter; polsternde Wirkung
- 4. Schicht – Semipermeable Polyurethanfolie**
Durchlässig für Gase

Askina® Transorbent®	Größe mit FR*	Größe ohne FR	VE	PZN	REF
	5 x 7 cm		10 Stück	04010751	0072786 R
	10 x 10 cm		5 Stück	07331183	0072789 U
	15 x 15 cm		5 Stück	07331208	0072790 V
	20 x 20 cm		5 Stück	07331214	0072791 W
Border	9 x 14 cm	5 x 10 cm	5 Stück	00045818	0072705 B
	14 x 14 cm	10 x 10 cm	5 Stück	00045824	0072710 C
	17 x 17 cm	13 x 13 cm	5 Stück	00045830	0072715 D
	24 x 24 cm	20 x 20 cm	5 Stück	00045847	0072720 E
Sacrum	18 x 20 cm	15 x 16,5 cm	5 Stück	08911698	0072792 X

*FR = Fixierrand (umlaufend ca. 2 cm)

CEPTON Studie im Auftrag BVMed 12

Moderne Wundversorgung steigert Heilungsraten und senkt Therapiekosten.

Durch den Einsatz moderner Produkte zur Wundbehandlung können der Bedarf an Verbandwechseln um ein Vielfaches reduziert, die Kosten der Therapie um 25% gesenkt und die Heilungsraten um über 130% gesteigert werden.

Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Spalthautentnahmestellen
- › Traumatische Wunden



Askina® Transorbent®



Askina® Transorbent® Border



Askina® Transorbent® Sacrum



Askina® Carbosorb

Geruch-Adsorbierender Sekundärverband



Die sterile Wundkomresse Askina® Carbosorb ist im Inneren mit einem Aktivkohlefilter versehen, der sowohl Gerüche als auch Bakterien adsorbiert. Der Wundverband ist als zusätzlicher Sekundärverband geeignet für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden. Besonders wenn eine Infektion und/oder die Entwicklung unangenehmer Gerüche vorliegt kann es sinnvoll sein, Askina® Absorb+ und Askina® Carbosorb zu kombinieren.

TIPPS ZUR FIXIERUNG

- › Fixierung mit einer zirkulären Fixier- oder Kompressionsbinde am Unterschenkel bzw. Fuß.
- › Eine randseitige Fixierung ist mit Rollenpflastern entsprechender Breite möglich. Auf hautschonende Klebeeigenschaften ist zu achten.
- › Fixierung mit einem flächigen Fixiervlies an Stellen, auf die Bewegung und Scherkräfte einwirken.

Einsatzgebiete


- › Ulcus cruris venosum
- › Fäkale Fisteln
- › Infizierte und/oder unangenehm riechende chirurgische oder traumatische Wunden
- › Als Sekundärverband, besonders bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein Folienverband verwendet werden kann

Askina® Carbosorb	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	07267077	9025006
	10 cm x 20 cm	10 Stück	07267083	9025014



Askina® Calgitrol® Ag

Silberalginat-Wundauflage

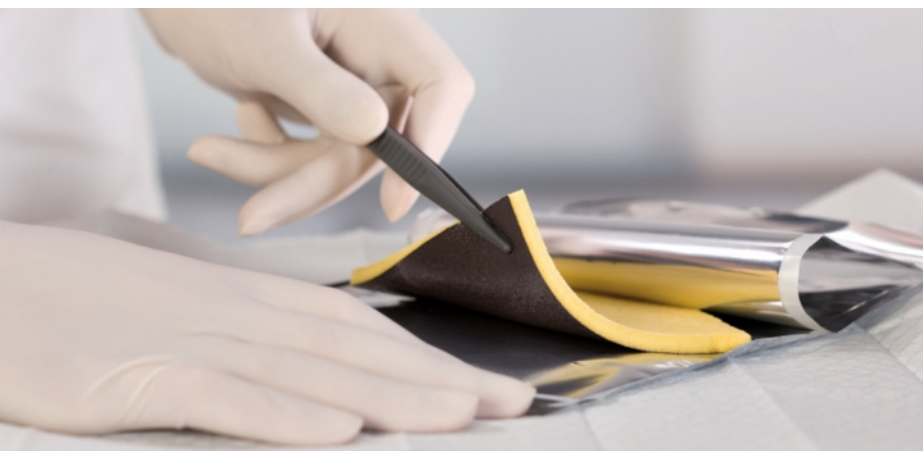


Askina® Calgitrol® Ag besteht aus einer Kombination aus Silberionen und Alginat. Diese Kombination wirkt gegen ein breites Erregerspektrum und schützt die Wunde vor mikrobieller Kontamination.

- › Aktivierung der antimikrobiellen Wirkung ohne Zugabe von sterilem Wasser
- › Wirkungseintritt nach 2 Stunden
- › Antimikrobielle Wirksamkeit bis zu 7 Tagen^{7,8}
- › Nicht Haut-reizend, Latex-frei
- › Wirksam gegen MRSA, Pseudomonas, E. Coli

Ca^{2+} Kalziumionen

Ag^+ 100 % ionisches Silber

Na^+ Natriumionen

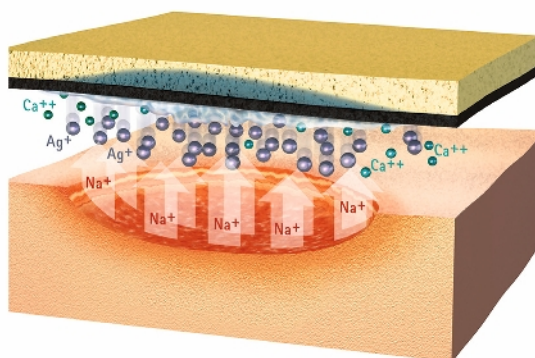

Askina® Calgitrol® Ag	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	00008898	6211010
	15 cm x 15 cm	10 Stück	00008958	6211510
	20 cm x 20 cm	10 Stück	00009283	6212010

Weiterführende Informationen zu silberhaltigen Wundverbänden über Hotline:

- › Askina® Calgitrol® – einfach erklärt (9993263)
- › Anwendung von Silberverbänden (9993263)

Einsatzgebiete

Infizierte und kolonisierte, oberflächliche oder tiefe Wunden

- › Dekubitus Kategorie II – IV
- › Ulcus cruris venosum
- › Diabetisches Fußulcus



Askina® Gel


Hydrogel für ein autolytisches Débridement



Askina® Gel ist ein kristallklares, visköses, steriles Gel, das den körpereigenen Wundreinigungsmechanismus unterstützt. Askina® Gel schafft feuchte Wundverhältnisse, welche die Heilung fördern.

- › Lässt sich sehr einfach auf die Wunde auftragen – auch mit einer Hand
- › Reagiert angepasst auf die jeweilige Wundsituation
- › Verklebt nicht mit der Wunde
- › Reguliert die Feuchtigkeit im Wundbett
- › Kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen
- › Als Hydrogel erstattungsfähig
- › Steriles Einmalprodukt

So wirkt Askina® Gel!

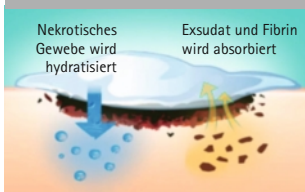

Hydrogele wie Askina® Gel erleichtern das Débridement und die Entfernung des nekrotischen und fibrinösen Gewebes und anderen abgestorbenen Materials.

Askina® Gel	Abmessung	VE	PZN	REF
	15 g	5 Stück	00755129	001419 S
	15 g	10 Stück	00638665	001419 N

TIPP

Es hat sich auch bewährt, vor der Applikation von Askina® Gel die Wunde mit Prontosan® Wundspüllösung zu reinigen.

Einsatzgebiete

Problemwunden mit geringer Exsudatbildung und nekrotischen Ablagerungen

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Diabetisches Fußulcus



Askina® Derm

Semipermeabler Transparent-Wundverband



Der semipermeable Transparentverband Askina® Derm aus Polyurethan wird bevorzugt in den Bereichen Kanülen- und Katheterfixation und zur Wundversorgung eingesetzt.

- › Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Mikroorganismen
- › Ständige Beobachtung der Punktionsstelle oder der Wunde ohne Verbandwechsel
- › Reduziert die Scherkräfte z. B. im Sakralbereich
- › Verbesserte Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)

Das neue innovative Anwendungssystem von Askina® Derm



① Entfernen des bedruckten Schutzpapiers von der klebenden Seite des Verbands.



② Positionieren des Verbands mit der klebenden Seite nach unten über der Wunde. Sanft andrücken.



③ Seitliche Schutzfolien langsam mit beiden Händen entfernen. Verband mit abrollenden Bewegungen auf der gesunden Haut festdrücken.



④ Nach Befestigung des Verbands Trägerfolie mit den grünen Pfeilen in Pfeilrichtung abziehen.

Askina® Derm	Abmessung	VE	PZN	REF
Kleinpackungen	6 cm x 7 cm	5 Stück	00156239	F72031
	10 cm x 12 cm	5 Stück	00156245	F72034
Großpackungen	6 cm x 7 cm	100 Stück	07430092	F72033
	10 cm x 12 cm	50 Stück	07430100	F72036
	15 cm x 20 cm	10 Stück	07430123	F72038

TIPP

Askina® Derm eignet sich zur Portalkatheter-Fixierung. Informationen hierzu:

Celsite® Portalkatheter-Systeme

Pflegebroschüre – der sichere Umgang mit Portalkatheter-Systemen (Werbemittel-Bestellnummer: 9994688)

www.bbraun.de/portalkatheterversorgung


Einsatzgebiete

Fixierung

- › Ideal zur Fixierung von intravenösen Kathetern

Wundversorgung

- › Dekubitusprophylaxe und -therapie
- › Hautabschürfungen
- › Hautspendeareale
- › Oberflächliche Verbrennungen
- › Als Sekundärverband beim Einsatz von Askina® Gel, Prontosan® Wound Gel oder Salben

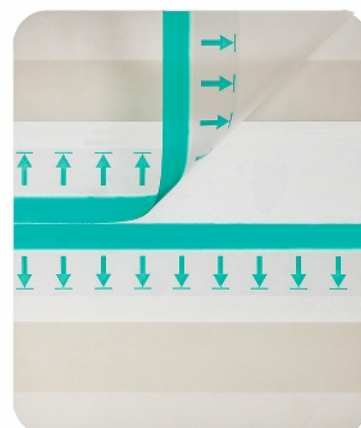

Askina® Pad | Pad S

Saugfähige Vliesstoffkompressen




TIPP

Netzartig, glänzende Polyesterfolie wundseitig auflegen! So wird ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und dem Wundrand vermieden.

Askina® Pad Vliesstoffkompressen sind sehr weich und anschmiegsam und ermöglichen eine gute Polsterung der Wunde. Durch die so gesicherte Wundruhe kann ein schonender und schmerzärmer Verbandwechsel durchgeführt und der Heilungsprozess gefördert werden.

Das Drei-Schicht-System

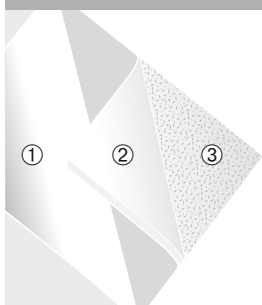

1. Schicht – Feste Vliesstoffoberseite

Kein Fusseln des Polsters mehr möglich

2. Schicht – Mehrlagiges Baumwollacrylfaserpolster

Besonders saugfähig, hohe Polsterwirkung

3. Schicht – Wundseite netzartige Polyesterfolie

Kein Verkleben mit der Wunde, rascher Sekrettransport durch microfeines Gitternetz

Einsatzgebiete Askina® Pad

- › Absorbierende Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie
- › Als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

Einsatzgebiete Askina® Pad S

Gebrauchsfertige Schlitzkompressen mit Lochstanzung zur Wundversorgung von

- › Kathetern (Drainagen, PEG-Sonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern)
- › Draht- und Nagelextensionen

Askina® Pad	Abmessung	VE	PZN	REF
Pad	5 cm x 5 cm	25 Stück	06646045	9024000
	5 cm x 5 cm	100 Stück	06647346	9024018
	10 cm x 10 cm	10 Stück	06646051	9024026
	10 cm x 10 cm	100 Stück	06647352	9024034
	20 cm x 10 cm	100 Stück	06646068	9024042
Pad S	5 cm x 5 cm	30 Stück	00323536	9024050
	7,5 cm x 7,5 cm	30 Stück	00323542	9024069
	Lochdurchmesser 4,1 – 11 mm für Ch. 9 – 30			



Askina® Touch

Nichthaftende Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogelbeschichtung



ANWENDUNGSHINWEIS

Helle Seite wundseitig auflegen

ANWENDUNG bei Ulcus cruris

Sekundärverband mit Fixier- oder Kompressionsbinden.

TIPP

Schaumverbände müssen gewechselt werden, wenn sich die Wunde sichtbar durch den Verband abzeichnet, spätestens nach 7 Tagen Tragedauer.

Askina® Touch schont empfindliche Haut in der Wundumgebung

- › Besonders geeignet für den Einsatz bei geschädigter Umgebungshaut, wie z. B. Pergamenthaut, kortisongeschädigte Haut, Altershaut
- › Ohne Klebstoff, daher nichthaftend, zur Schonung der empfindlichen Umgebungshaut
- › Hydrogelbeschichtung für idealfeuchtes Wundmilieu fördert die physiologischen Heilungsprozesse
- › Verklebt nicht mit der Wunde, dadurch einfache, schmerzarme und atraumatische Verbandwechsel
- › Behält seine Funktion auch unter Kompressionsverbänden

Einsatzgebiete

Akute und chronische Wunden

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Oberflächliche Verbrennungen
- › Hautabschürfungen
- › Spalthautentnahmestellen
- › bei geschädigter Umgebungshaut

Askina® Touch	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	00151176	7261002
	15 cm x 15 cm	5 Stück	00151182	7262252
	20 cm x 20 cm	5 Stück	00151213	7264001



Askina® THINSite®

Dünne, mehrschichtige Wundauflage mit Hydrogelbeschichtung



Extrem dünn, besonders flexibel und trotzdem sehr aufnahmefähig.

- › Kann hervorragend an schwierige Konturen angepasst werden
- › Verband trägt nicht auf
- › Kein Aufrollen der Kanten
- › Sehr leicht und damit besonders für mobile Patienten angenehm zu tragen

Einsatzgebiete

- › Oberflächliche bis tiefe Hautwunden
- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Vorbeugung gegen Hautschädigungen

CEPTON Studie im Auftrag BVMed¹²

Trotz der nachweisbaren Vorteile sowohl hinsichtlich medizinischer Wirksamkeit als auch gesundheitsökonomischer Kosteneffektivität werden konventionelle Verbandstoffe immer noch 40-mal so häufig eingesetzt wie moderne.

Askina® THINSite®	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	5 Stück	02352855	0072889 U
	15 cm x 15 cm	5 Stück	02352861	0072890 V
	20 cm x 20 cm	5 Stück	02352878	0072891 W



Askina® Barrier Film | Swabs | Cream

Schnelltrocknender, atmungsaktiver Hautschutz



TIPP

- › Halten Sie die Sprühdüse 10 bis 15 cm von der Haut weg, drücken Sie die Sprühdüse und tragen Sie eine gleichmäßige Beschichtung des Films über die notwendige Fläche auf.
- › Lassen Sie den Film für 30 Sekunden trocknen.

Askina® Barrier Film, der effektive Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- sowie der Wundversorgung.

Der flüssige Schutzfilm von Askina® Barrier Film trocknet schnell ab und schützt die Haut zuverlässig vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibungen.

- › Alkoholfrei und transparent
- › Sauerstoffdurchlässig und daher atmungsaktiv
- › Trocknet in nur 30 Sekunden
- › Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- › Effektiver Hautschutz

Einsatzgebiete

- › Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit
- › Schutz der Haut vor Mazeration

Einsatzgebiete



① Inkontinenz Patienten



② Inkontinenz Dermatitis mit Hautschäden



③ Wundrand



④ Kathetereintrittsstelle



⑤ Peristomiale Haut

Askina® Barrier	Abmessung	VE	PZN	REF
Askina® Barrier Film				
Pumpspray	28 ml	1 Stück	06905222	4002801
	28 ml	12 Stück	06905245	4002812
Askina® Barrier Swabs	1 ml	5 Stück	06905162	4000105
	1 ml	25 Stück	06905179	4000125
Askina® Barrier Cream	28 gr	1 Stück	10417511	4112801
	28 gr	12 Stück	10417534	4112812
	92 gr	1 Stück	10417540	4119201
	92 gr	12 Stück	10417557	4119212



Askina® Barrier Film



Askina® Barrier Cream



Askina® Barrier Swabs

Klassische Verbandstoffe

Askina® – Qualität hat einen Namen

Alle Produkte und Größen finden
Sie im Askina® Verbandstoffkatalog
Nr. 999 6630



Fixierpflaster

- › Askina® Silk – Seidenpflaster
- › Askina® Pore – Vliespflaster
- › Askina® Tex – Textilpflaster
- › Askina® Film – perforiertes Folienpflaster
- › Askina® Fix – hypoallergenes Fixiervlies

Wundverbände

- › Askina® Soft steril – hypoallergener Wundverband
- › Askina® Soft Clear – transparenter Wundverband

Wundauflagen

- › Askina® Mullkompressen –
aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten
- › Askina® Vliesstoffkompressen

Mull-/Zellstoffprodukte

- › Askina® Schlinggazetupfer – pflaumengroß, walnussgroß

Fixiervbände

- › Askina® Elast fine – elastische Fixierbinde
- › Askina® kohäsive Fixierbinde –
elastische, auf sich selbst haftende Fixierbinde, latexfrei



Kompressionsverbände

- › Askina® Kurzzugbinde (auch kohäsiv)
- › Askina® 2-Layer-System – aus Polsterbinde und kohäsiver Binde

Trikotschlauchbandagen

- › Askina® TS-Bandage – zur Fixierung von Wundauflagen

Leitfaden zur Versorgung chronischer Wunden

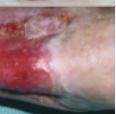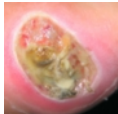Wundbeschreibung / Wundsituation		Ziel	Maßnahme
● Schwarze Nekrose 	bei pAVK	Verbesserung der Durchblutungssituation	Arzt konsultieren Nekrose trocken belassen, nicht rehydrieren
	ohne pAVK	Nekrosefreie Wunde	Chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Evtl. Rehydration mit Hydrogel
● Schwarze Nekrose + ● Fibrinbeläge oder ● Schwarze Nekrose + ● Fibrinbeläge + ● Granulation  	trocken	Nekrose- / fibrinfreier Wundgrund	Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Rehydration, Förderung der Exsudation
	feucht	Nekrose- / fibrinfreier Wundgrund	Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse Wundrandschutz
	nass	Nekrose- / fibrinfreier Wundgrund	Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Rehydration Förderung der Autolyse
● Fibrinbeläge oder ● Fibrinbeläge + ● Granulation  	trocken	Fibrinfreier Wundgrund, Förderung der Granulation	Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Rehydration Förderung der Autolyse
	feucht	Fibrinfreier Wundgrund, Förderung der Granulation	Evtl. chirurg. Débridement (danach Wunde neu klassifizieren) Exsudatmanagement, Förderung der Autolyse Wundrandschutz
	nass	Fibrinfreier Wundgrund, Förderung der Granulation	Rehydration Schutz vor Kontamination Wundruhe gewährleisten
● Granulation  	trocken	Förderung der Granulation	Exsudatmanagement Schutz vor Kontamination Wundruhe gewährleisten
	feucht	Förderung der Granulation	Rehydration Schutz des Wundrandes/ des neu gebildeten Epithelgewebes Wundruhe gewährleisten
	nass	Förderung der Granulation	Exsudatmanagement Schutz des Wundrandes/ des neu gebildeten Epithelgewebes Wundruhe gewährleisten
● Granulation + ● Epithelisation  	trocken	Förderung der Granulation und Epithelisation	Exsudatmanagement Schutz des Wundrandes/ des neu gebildeten Epithelgewebes Wundruhe gewährleisten
	feucht	Förderung der Granulation und Epithelisation	Stabilisierung des neu gebildeten Gewebes
	nass	Förderung der Granulation und Epithelisation	Stabilisierung des neu gebildeten Gewebes
● Epithelisation 	trocken	Stabilisierung des neu gebildeten Gewebes	Schutz des neu gebildeten Gewebes Schutz vor mechanischen Einflüssen
	feucht	Infektfreie Wunde	Infektbekämpfung Rehydration Geruchsminimierung, ggf. Débridement
	nass	Infektfreie Wunde	Infektbekämpfung Exsudatmanagement Geruchsminimierung, ggf. Débridement
Infizierte Wunde 	trocken	Infektfreie Wunde	Infektbekämpfung Rehydration Geruchsminimierung, ggf. Débridement
	feucht	Infektfreie Wunde	Infektbekämpfung Exsudatmanagement Geruchsminimierung, ggf. Débridement
	nass	Infektfreie Wunde	Infektbekämpfung Exsudatmanagement Geruchsminimierung, ggf. Débridement

Hautpflege und Wundrandschutz müssen in jeder Wundsituation mit geeigneten Methoden durchgeführt werden. Gebrauchsanweisungen Askina® SilNet schützt die umliegende Haut und den Wundrand und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Daher ist Askina®

Wundreinigung / -spülung	Wundfüller	Wundabdeckung
nicht erforderlich	nicht erforderlich	Askina® Pad Askina® Soft steril
Prontosan® Wunde mechanisch reinigen	evtl. Askina® Gel	Askina® SilNet Askina® Pad
Prontosan® (Prontosan® einwirken lassen) Wunde mechanisch reinigen	Prontosan® Wound Gel Prontosan® Wound Gel X	Askina® SilNet Askina® Pad
Prontosan® (Prontosan® einwirken lassen) Wunde mechanisch reinigen	Askina® Sorb	Askina® SilNet Askina® Absorb+ Askina® Foam, Askina® Heel
Prontosan® (Prontosan® einwirken lassen) Wunde mechanisch reinigen	Prontosan® Wound Gel Prontosan® Wound Gel X	Askina® SilNet / Askina® DresSil Askina® Touch Askina® Transorbent®
Prontosan® (Prontosan® einwirken lassen) Wunde mechanisch reinigen	Askina® Sorb Askina® Foam Cavity	Askina® SilNet Askina® Foam, Askina® DresSil
Prontosan® Keine aggressive mechanische Reinigung	Askina® Gel, Prontosan® Wound Gel, Prontosan® Wound Gel X evtl. in Kombination mit Askina® Sorb	Askina® SilNet / Askina® DresSil Askina® Touch Askina® Transorbent®
Spülung mit Prontosan® Keine aggressive mechanische Reinigung	Askina® Sorb Askina® Foam Cavity	Askina® SilNet Askina® Foam, Askina® DresSil
Spülung mit Prontosan® Keine aggressive mechanische Reinigung	Askina® Gel	Askina® SilNet / Askina® DresSil Askina® Transorbent® Askina® Touch Askina® THINSite®
Spülung mit Prontosan® Keine aggressive mechanische Reinigung	nicht erforderlich	Askina® SilNet / Askina® DresSil Askina® Transorbent® Askina® Touch Askina® Foam, Askina® Heel
nicht erforderlich	nicht erforderlich	Askina® DresSil Askina® Derm Askina® THINSite
Spülung mit Prontosan®	Prontosan® Wound Gel Prontosan® Wound Gel X Askina® Calgitrol® in der Tube	Askina® Pad
Spülung mit Prontosan®	Askina® Calgitrol® in der Tube	Askina® Calgitrol® Ag Askina® Foam Askina® Absorb+

beachten.
SilNet in jeder Wundheilungsphase einsetzbar.

Hygiene

Rundum wirksam schützen



Ein richtig durchgeführtes und optimal konzipiertes Hygienemanagement ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Praxisalltag und den Schutz von Patienten und Anwendern.

Mit hochwertigen Produkten, praktischen Hilfsmitteln und Serviceleistungen bietet B. Braun ein rundum professionelles Hygienemanagement.

Unser Produktangebot ist optimal aufeinander abgestimmt. Dazu gehören Handschuhe und Schutzbekleidung, Produkte zur Desinfektion, Reinigung und Pflege sowie zur Dekolonisation von multiresistenten Erregern (MRE). Als Hygienespezialist stellen wir mit der B. Braun Praxishygienebegehung eine spezielle Dienstleistung zur Optimierung der Hygiene in medizinischen Einrichtungen zur Verfügung.

Wir analysieren Stärken und Schwächen des vorhandenen Hygieneregimes und erstellen einen individuellen Hygieneplan gemäß rechtlicher Anforderungen.



www.hygiene.bbraun.de
www.mre.bbraun.de



Mehr Informationen auch im Bereich
Hygiene



Weitere Informationen für Sie

Gut zu wissen



Unser Ziel ist es, mit Serviceleistungen zu einer effizienten und hochwertigen Prozessgestaltung in der Gesundheitsversorgung beizutragen. So bieten wir unseren Kunden und Partnern an, im Dialog Wissen über Produkte, Therapien und Prozesse zu teilen. Wir bieten ein umfassendes, optimal aufeinander abgestimmtes Angebot:

SERVICES

- › Ausgewählte Workshops für Ärzte und Praxispersonal (z. B. zu Nahlappenplastiken, Dentalchirurgie)
- › Trainings zu den Themen:
 - Versorgung chronischer Wunden
 - Wunde & Wundreinigung
 - MRSA
 - Expertenstandards (Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden & Dekubitusprophylaxe)
 - Klassische Wundversorgung

WISSEN

- › Fachwissen-Websites:
www.wundheilung.bbraun.de
- › Informationen rund um das Thema Wundheilung
- › Publikationen und Studien
- › Anwendungsfilme
- › Vorträge und Symposien
- › Erstattung und Abrechnung
- › Patienteninformationen und Ratgeber



Unsere Stärke liegt im Verstehen von Ärzten und

Mit unserer Kombination aus Produkten, Services und Wissen ermöglichen wir in acht Anwendungsbereichen eine optimale Versorgung von Patienten – stationär, ambulant oder zu Hause.

Deshalb vertrauen uns unsere Kunden seit 175 Jahren.

Hygiene

Rundum wirksam schützen



Mit hochwertigen Produkten, praktischen Hilfsmitteln und Serviceleistungen bietet B. Braun ein rundum professionelles Hygienemanagement.

Infusion

Einfach sicher arbeiten



Vom Infusionsbehältnis über die Infusionstechnik bis zum Patientenzugang – B. Braun bietet eine umfassende Produktpalette für eine sichere Infusionstherapie.



Mehr Informationen unter
www.ambulant-bbraun.de

medizinischem Fachpersonal

Anästhesie & Schmerz

Sicherheit mit System



Das moderne Konzept von B. Braun für die Allgemein- und Regionalanästhesie gewährleistet Sicherheit und Verträglichkeit.

Diabetes

Alles im Blick



Das Diabetesmanagement von B. Braun bietet eine solide Basis und schafft wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie.

Ernährung

Täglich ausreichend Energie



B. Braun bietet einfache, sichere und effiziente Ernährungstherapien und unterstützt seine Kunden mit professioneller Beratung und patientenorientierten Dienstleistungen.

Kontinenz

Ein sicheres Gefühl



Mit einer – auf die jeweilige Kontinenzstörung angepassten Versorgung von B. Braun – kann der Betroffene wieder mit einem sicheren Gefühl am Familien- und Gesellschaftsleben teilnehmen.

Stoma

Freiheit aktiv erleben



Die Produkte von B. Braun bieten bedeutende Vorteile in Funktion, Design, Tragekomfort und Handling. Sie tragen entscheidend dazu bei, den Betroffenen ein Stück Lebensqualität zurückzugeben.

Wunde

Immer gut versorgt



Mit dem umfassenden Sortiment von B. Braun zur Wundversorgung kann jede Wundsituation therapiegerecht behandelt werden.

Literatur

- 1 Heyer et al. "Effectiveness of Advanced versus Conventional Wound Dressings on Healing of Chronic Wounds: Systematic Review and Meta-Analysis". *Dermatology* 2013; 226:172-184
- 2 Eberlein et al. „Versorgung und Pflege der Eintrittsstellen von PEG/PEJ-Sonden". *Die Schwester, Der Pfleger* 46. Jahrgang, 10/2007, 001-004
- 3 Perez R. Davies S.C. Kaehn K. „Wirkung verschiedener Wundspüllösungen auf MRSA Biofilme in Wunden im Tiermodell. *Wundmanagement*". 2010; 4(2):44-48"
- 4 Afinogenov G.E. „Prüfbericht zur Beurteilung der Ausbildung von Biofilm unter Einfluss von Prontosan." Federal Agency for High Technology Medical Aid. 2009 October
- 5 Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri A. „Vergleich der Effektivität von Spüllösungen auf Biofilm. *Zeitschrift für Wundheilung*." 2005 August; 4: 160-164.
- 6 B. Braun 2011. "Study of silver migration from wound dressing materials". Report HOSP217. B.Braun Hospicare. Ltd. Available from: <http://tinyurl.com/75ggnuc>
- 7 B. Braun. "Log Reduction (LR) measure of efficacy of Askina® Calgitrol® Paste, Flamazine Cream and Flaminal® Hydro against Cultures of *P. aeruginosa* (NCIMB 8626) and *E. coli* (NCIMB 12416)". (Testing carried out by Institute of Technology, Sligo); Report HOSP 283A, B. Braun Hospicare Ltd., 2011.
- 8 B. Braun. "Log Reduction (LR) measure of efficacy (results only) of Askina® Calgitrol® Paste and Flamazine Cream against a Culture of Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA, ATCC BAA-44)". (Testing carried out by Institute of Technology, Sligo); Report HOSP 303, B. Braun Hospicare Ltd., 2011.
- 9 B. Braun. "Measurement of serum silver from Askina® Calgitrol® Paste in a swine dermal wound model." (Testing carried out by NAMS); Report HOSP 257. B. Braun Hospicare Ltd, 2009
- 10 Wan AT, et al. "Determination of silver in blood, urine, and tissues of volunteers and burn patients." *Clin Chem*. 1991;37(10 Pt1):1683-1687.
- 11 Standardtestmethode basierend auf dem Test für Absorptionsfähigkeit (Nachtrag von 1995 der britischen Pharmacopea aus 1993) *Surgical Testing Material Laboratory*. Report 97/825/1, January 1997.
- 12 http://www.bvmed.de/themen/medizinprodukteindustrie-1/BVMed_intern/pressemitteilung/Nutzen_durch_Innovation_Neue_Studie_von_CEPTON_belegt_Beitrag_medizintechnologischer_Innovation.html

Bestellformular

Haut- und Wundmanagement


Produkt/Abmessung	VE	PZN	REF	Anzahl
Prontosan®				
Patronenflasche 40 ml	24 Stück	09513652	400484	
Spritzflasche 350 ml	1 Stück	02850062	400403	
Spritzflasche 1.000 ml	1 Stück	09003678	400446	
Prontosan® Wound Gel				
Patronenflasche 30 ml	1 Stück	02855349	400505	
Prontosan® Wound Gel X				
Tube 50 g	1 Stück	09706693	400517	
Tube 250 g	1 Stück	06464893	400508	
Prontosan® Wound Spray				
Sprühflasche 75 ml	20 Stück	09447292	400565	
Lavasept® steriles Konzentrat				
Ampulle 2 ml	1 Stück	05950108	4927321	
Ampulle 2 ml	5 Stück	05950120	4925322	
Flasche 100 ml	1 Stück	05950137	4927031	
Askina® Calgitrol®				
Tube 15 g	5 Stück	09711530	6241505	
Tube 15 g	10 Stück	09711547	6241510	
Askina® Sorb				
6 cm x 6 cm	3 Stück	02251605	21095	
6 cm x 6 cm	10 Stück	02251611	21155	
10 cm x 10 cm	3 Stück	02251640	21075	
10 cm x 10 cm	10 Stück	02251657	21165	
15 cm x 15 cm	3 Stück	02252088	21085	
15 cm x 15 cm	10 Stück	02252102	21025	
Tamponade 2,7 x 34 cm	3 Stück	02258323	21065	
Askina® SilNet				
5 cm x 7,5 cm	10 Stück	05496017	5195710	
5 cm x 7,5 cm	3 Stück	05496023	5195703	
10 cm x 7,5 cm	10 Stück	05495957	5197510	
10 cm x 7,5 cm	3 Stück	05495963	5197503	
10 cm x 18 cm	10 Stück	05495986	5191810	
10 cm x 18 cm	3 Stück	05495992	5191803	
20 cm x 30 cm	5 Stück	05496000	5192305	
Askina® DresSil				
5 cm x 7 cm	3 Stück	06489137	5295703	
5 cm x 7 cm	10 Stück	06489166	5295710	
10 cm x 10 cm	3 Stück	06489172	5291003	
10 cm x 10 cm	10 Stück	06489189	5291010	
15 cm x 15 cm	3 Stück	06489203	5291503	
15 cm x 15 cm	10 Stück	06489226	5291510	
10 cm x 20 cm	3 Stück	06489338	5291203	
10 cm x 20 cm	10 Stück	06489404	5291210	
20 cm x 20 cm	5 Stück	06489410	5292005	
Askina® DresSil Border				
6 cm x 6 cm	10 Stück	10397317	5396610	
7,5 cm x 7,5 cm	3 Stück	07626211	5397503	
7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	07626300	5397510	
10 cm x 10 cm	3 Stück	07626323	5391003	
10 cm x 10 cm	10 Stück	07626352	5391010	
15 cm x 15 cm	3 Stück	07626375	5391503	
15 cm x 15 cm	10 Stück	07626381	5391510	
15 cm x 20 cm	3 Stück	07626435	5395203	
15 cm x 20 cm	10 Stück	07626441	5395210	
20 cm x 20 cm	5 Stück	07626458	5392005	
Askina® DresSil Sacrum				
16 cm x 17,5 cm	5 Stück	07765243	5491605	
Askina® DresSil Heel				
22 cm x 21,6 cm	5 Stück	10397323	5592205	
Askina® Foam				
5 cm x 7 cm	3 Stück	02163775	7240703	
5 cm x 7 cm	10 Stück	02192707	7240710	
10 cm x 10 cm	3 Stück	02192713	7241003	
10 cm x 10 cm	10 Stück	02231548	7241010	
10 cm x 20 cm	10 Stück	02239024	7241210	
20 cm x 20 cm	5 Stück	02243646	7242005	
Askina® Foam Cavity				
2,5 cm x 40 cm	3 Stück	02593375	7244003	
2,5 cm x 40 cm	10 Stück	02593381	7244010	
Askina® Trachea				
9,5 cm x 8,5 cm	10 Stück	02499972	7248510	
Askina® Heel				
225 cm²	5 Stück	00009308	7240105	

Produkt/Abmessung	VE	PZN	REF	Anzahl
Askina® Absorb+				
10 cm x 10 cm	10 Stück	09390451	3331010	
10 cm x 20 cm	10 Stück	09390468	3331210	
20 cm x 20 cm	5 Stück	09390474	3332005	
Askina® Transorbent®				
5 cm x 7 cm	10 Stück	04010751	0072786R	
10 cm x 10 cm	5 Stück	07331183	0072789U	
15 cm x 15 cm	5 Stück	07331208	0072790V	
20 cm x 20 cm	5 Stück	07331214	0072791W	
Askina® Transorbent® Border				
9 cm x 14 cm	5 Stück	00045818	0072705B	
14 cm x 14 cm	5 Stück	00045824	0072710C	
17 cm x 17 cm	5 Stück	00045830	0072715D	
24 cm x 24 cm	5 Stück	00045847	0072720E	
Askina® Transorbent® Sacrum				
18 cm x 20 cm	5 Stück	08911698	0072792X	
Askina® Carbosorb				
10 cm x 10 cm	10 Stück	07267077	9025006	
10 cm x 20 cm	10 Stück	07267083	9025014	
Askina® Calgitrol® Ag				
10 cm x 10 cm	10 Stück	00008898	6211010	
15 cm x 15 cm	10 Stück	00008958	6211510	
20 cm x 20 cm	10 Stück	00009283	6212010	
Askina® Gel				
Tube mit 15 g Inhalt	5 Stück	00755129	001419S	
Tube mit 15 g Inhalt	10 Stück	00638665	001419N	
Askina® Derm				
6 cm x 7 cm	5 Stück	00156239	F72031	
10 cm x 12 cm	5 Stück	00156245	F72034	
Großpackungen				
6 cm x 7 cm	100 Stück	07430092	F72033	
10 cm x 12 cm	50 Stück	07430100	F72036	
15 cm x 20 cm	10 Stück	07430123	F72038	
Askina® Pad				
5 cm x 5 cm	25 Stück	06646045	9024000	
5 cm x 5 cm	100 Stück	06647346	9024018	
10 cm x 10 cm	10 Stück	06646051	9024026	
10 cm x 10 cm	100 Stück	06647352	9024034	
20 cm x 10 cm	100 Stück	06646068	9024042	
Askina® Pad S				
5 cm x 5 cm	30 Stück	00323536	9024050	
7,5 cm x 7,5 cm	30 Stück	00323542	9024069	
Askina® Touch				
10 cm x 10 cm	10 Stück	00151176	7261002	
15 cm x 15 cm	5 Stück	00151182	7262252	
20 cm x 20 cm	5 Stück	00151213	7264001	
Askina® THINSite®				
10 cm x 10 cm	5 Stück	02352855	0072889U	
15 cm x 15 cm	5 Stück	02352861	0072890V	
20 cm x 20 cm	5 Stück	02352878	0072891W	
Askina® Barrier Film				
Pumpspray 28 ml	1 Stück	06905222	4002801	
Pumpspray 28 ml	12 Stück	06905245	4002812	
Askina® Barrier Swabs				
Applikator 1 ml	5 Stück	06905162	4000105	
Applikator 1 ml	25 Stück	06905179	4000125	
Askina® Barrier Cream				
Tube 28 gr	1 Stück	10417511	4112801	
Tube 28 gr	12 Stück	10417534	4112812	
Tube 92 gr	1 Stück	10417540	4119201	
Tube 92 gr	12 Stück	10417557	4119212	

Absender

Kunden-Nummer:

Kommission:

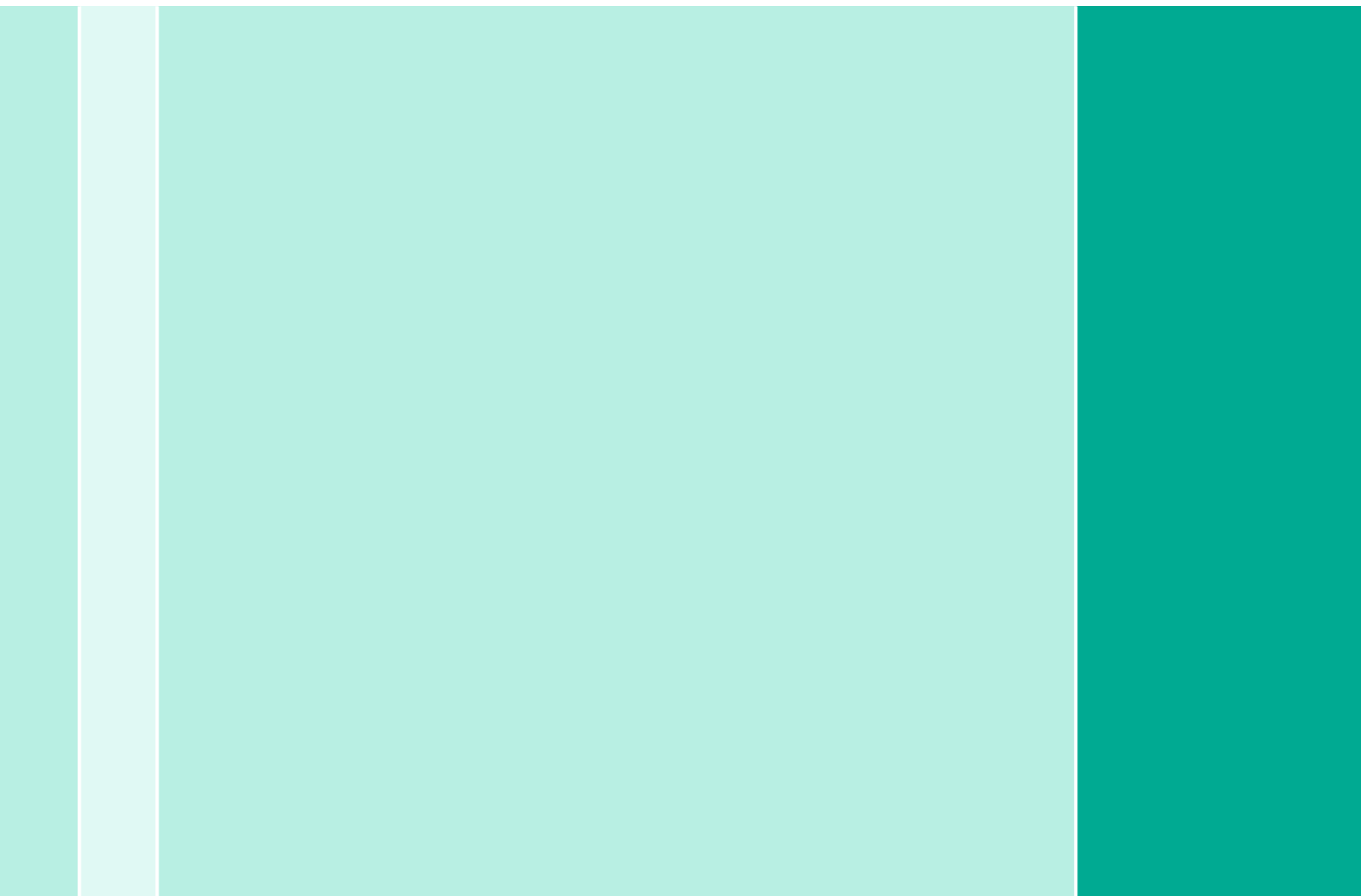

Benötigen Sie Unterstützung innerhalb eines Therapie-
feldes oder wünschen Sie Produkt- und Serviceinformationen?

Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

Hotline (0 56 61) 71-33 99

www.wundheilung.bbraun.de

www.fachwissen.bbraun.de